

BD マックス™ 全自動核酸増幅検査装置 整備点検チェックシート

| | |
|--|-------------|
| 作業完了日： | 責任技術者： |
| 点検の種類： <input type="checkbox"/> 社内点検 <input type="checkbox"/> 社内修理 | 業務指示書番号：HAM |
| 戻り施設： | |
| 設置予定施設： | 点検実施者： |

| | | | |
|---------------|---------|------|-------|
| 全自動核酸増幅検査装置 | BD マックス | S/N: | |
| 装置ソフトウェアバージョン | | Ver: | |
| 装置 IPアドレス | Huey | | Dewey |
| | | | Louie |

| | | |
|--|--------|------|
| オールインワンコンピュータ | S/N: | |
| プレウォームヒーター <input type="checkbox"/> あり / <input type="checkbox"/> なし | S/N: | |
| UPS <input type="checkbox"/> あり / <input type="checkbox"/> なし | Model: | S/N: |
| バーコードリーダー <input type="checkbox"/> あり / <input type="checkbox"/> なし | Model: | S/N: |
| インクジェットプリンター <input type="checkbox"/> あり / <input type="checkbox"/> なし | Model: | S/N: |

【外観チェック/清掃】

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 本体にダメージがない | <input type="checkbox"/> OK | 本体の清掃（次亜塩素酸ナトリウム溶液） | <input type="checkbox"/> OK |
| 付属品にダメージがない | <input type="checkbox"/> OK | エアフィルターの清掃 | <input type="checkbox"/> OK |
| 直射日光が無く換気が良い場所に設置されている | <input type="checkbox"/> OK | | |

補填した付属品/交換品：有り / 無し

【設置本体の確認および調整】

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 本体水平度確認/調整 | <input type="checkbox"/> OK |
| 電源を入れた時に画面が立ち上がる | <input type="checkbox"/> OK |
| レールのグリスアップ | <input type="checkbox"/> OK |
| ベルトテンションの確認調整 | <input type="checkbox"/> OK |
| 各モーターの初期化（別紙参照） | <input type="checkbox"/> OK |
| ラックキャリブレーション | <input type="checkbox"/> OK |
| ポンプテスト | <input type="checkbox"/> OK |
| エンプティフィルチェック | <input type="checkbox"/> OK |
| フルフィルチェック | <input type="checkbox"/> OK |
| ヒーターテスト | <input type="checkbox"/> OK |
| リキッドセンスチェック | <input type="checkbox"/> OK |
| リーダーの清掃 | <input type="checkbox"/> OK |
| ヒーターの清掃 | <input type="checkbox"/> OK |

【設置本体および付属品の確認】

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 装置本体/AIO/付属品の確認 | <input type="checkbox"/> OK |
| 装置本体/AIOの設置 | <input type="checkbox"/> OK |
| マウス/キーボード/スキャナの設置 | <input type="checkbox"/> OK |
| UPSの設置 | <input type="checkbox"/> OK |
| プリンターの設置 | <input type="checkbox"/> OK |
| 梱包資材の処理 | <input type="checkbox"/> OK |

【電圧の確認】

| | | |
|--|-----|-----------------------------|
| TP1 (GND) - TP3 (11.4Vdc to 12.6Vdc) | Vdc | <input type="checkbox"/> OK |
| TP1 (GND) - TP4 (5.13Vdc to 5.17Vdc) | Vdc | <input type="checkbox"/> OK |
| TP1 (GND) - TP5 (3.38Vdc to 3.42Vdc) | Vdc | <input type="checkbox"/> OK |
| TP1 (GND) - TP6 (-11.4Vdc to -12.6Vdc) | Vdc | <input type="checkbox"/> OK |
| TP2 (GND) - TP7 (19.0Vdc to 21.0Vdc) | Vdc | <input type="checkbox"/> OK |
| TP2 (GND) - TP8 (22.8Vdc to 25.2Vdc) | Vdc | <input type="checkbox"/> OK |

Qualification Test (Top & Bottom)

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| <u>Top 24 Samples</u> | <input type="checkbox"/> OK |
| <u>Bottom 24 Samples</u> | <input type="checkbox"/> OK |

